

Hasta Fotoğraflama

Hasta fotoğrafları, Orthero tedavisine başlarken ihtiyacımız olan en önemli verilerden biridir. Fotoğraflar reçetenizi anlamamıza ve talimatlarınızı yorumlamamıza yardımcı olur. Vakanızı gönderirken elinizde hasta fotoğrafı yoksa, daha sonra elde ettiğiniz zaman vaka sayfasına yükleyebilirsiniz. Vakanızı işleme alabilmek için zorunlu verilerden bir tanesinin fotoğraflar olması nedeniyle, fotoğrafları en kısa zamanda temin etmenizi tavsiye ederiz.

Orthero tedavisinin hasta fotoğrafları gerektirmesinin sebepleri;

- Hastanın oklüzal düzlemini doğru konumlandırması: Hastanın gülün bir fotoğrafı olmadan, modeller oklüzal düzlem hatalı şekilde yönlenebilir ve bu da maksiller kesici dişlerin intrüde veya ekstrüde görünmesine neden olabilir. Oklüzal düzlemin açısı hastadan hastaya değişir. Ölçü tarandıktan sonra, teknisyenler reçetenizden tedaviyi hazırlamadan önce hastanın oklüzal düzlemini doğru şekilde yönlendirmeye çalışırlar.
- Orta hat düzleminin doğru konumlandırması: Tedavi planlaması yapılırken, daha doğru bir planlama için dişlerin orta hat düzleminin yüze göre konumuna ihtiyaç vardır.
- Dudak desteği: Analizde, genişleme ve linguale toplama işlemleri yapılırken, daha doğru bir planlama için dudak desteğinin görüldüğü profil fotoğrafına için ihtiyaç vardır.



Fotoğraflarınızın ayrı ayrı baskı halinde ya da dijital dosyalar olarak gönderilebilir veya burada gösterildiği gibi tek bir sayfada birlikte basılabilir. Fotoğraflarınızın formatı önemli değildir. Önemli olan, sekiz açıdan net, iyi aydınlatılmış fotoğraflar eklemenizdir.

Fotoğraf çekme ipuçları

Çoğu kamerada, fotoğrafı çekmek için deklanşöre yarıya kadar basmak fotoğrafa odaklanmaya yardımcı olacaktır. Odaklanmadan fotoğraf çekmek, genellikle bulanık fotoğraflara yol açar.

Fotoğraf çekerken en önemli faktörlerin başında ışık gelir. Bu nedenle, fotoğraflarınızı ofisinizin en iyi aydınlatılmış alanında çekmeniz tavsiye edilir. Flaş kullanmak bazen gerekli olabilir ancak görüntüleri düzleştirmeye meyillidir ve çok parlaksa ayrıntıları silerek bazen sorunlara neden olabilir. Ekranınız da iyi bir görüntü elde ediyorsanız, flaş kullanmamaya çalışın.

Fotoğrafladığınız objeye çok yaklaşımdan kaçının. Birçok kamerada yakın odaklanma son derece zordur. Buna ek olarak, eğer flaş kullanmanız gerekiyorsa ve çok yakından çekim yaptıysanız, flaş fotoğraftaki ayrıntıların çoğunu ortadan kaldıracaktır. Bu sebepler, yakın çekimlerde flaş kullanmamanızı tavsiye ederiz.

Önce-Sonra Fotoğraflar

Bize bir vaka gönderirken "önce" fotoğrafları hali hazırda elde etmiş oluyorsunuz. Son plak aşamasında, tedavinin ne kadar etkili olduğuna dair bir kayıt tutmak için aynı açılardan "sonra" fotoğrafı çekmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Fotoğraflanmış mükemmel tedavi sonuçları, kliniğinizde daha fazla Orthero hastası çekmek için en güçlü araçtır.

Panoramik Film

Her ne kadar reçetenizde, gömülü diş, ankiloz, implant veya restorasyonlu dişleri beyan etmiş olsanız da, tüm bu durumların varlığını panoramik x-ray film üzerinde de görmeyi tercih ediyoruz. Daha profesyonel bir tedavi planlaması için hastanızın panoramik x-ray filmini göndermenizi şiddetle tavsiye ediyoruz.

